

MAM BOLSAS PARA LA LECHE MATERNA

Almacenamiento seguro de la valiosa leche materna

25 bolsas MAM para leche materna de 180 ml, esterilizadas y listas para usar. Con apertura ancha, base estable y doble cierre antifugas. Fáciles de almacenar, con campo para rotulación, aptas para frigorífico y congelador, y compatibles con el sacaleches manual MAM.

Instrucciones de uso:

Antes de usar, marque la bolsa con nombre, fecha, hora y cantidad de leche con bolígrafo o rotulador permanente (no usar rotuladores de fieltro). Abra la bolsa rompiendo el sello de seguridad y separando el cierre con cuidado. No toque el interior para mantener la higiene. Llene con un máximo de 180 ml de leche, ya que al congelarse se expande (ver Fig. 1). Antes de cerrar, expulse el aire (ver Fig. 2) y cierre bien el doble cierre de presión. No coloque la bolsa en posición vertical hasta que esté cerrada (ver Fig. 3).

Para extraer directamente en la bolsa: es compatible con el sacaleches manual MAM y con los modelos 2 en 1, sin adaptador adicional. Incline el sacaleches e insértelo en la bolsa (ver Fig. 4), asegurándose de que quede bien fijado en la base (ver Fig. 5). Para retirarla, sujete la bolsa, incline el sacaleches y retírela con cuidado, sin tirar hacia abajo (ver Fig. 6).

CONSERVACIÓN DE LA LECHE MATERNA:

	RECOMENDACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LECHE MATERNA		
LECHE MATERNA:	Temperatura ambiente de 25 ° o inferior.	Refrigerador (4°)	Congelador (-18 °C o inferior)
-RECIÉN EXTRAÍDA	Hasta 4 horas	Hasta 24 horas	¡NUNCA volver a congelar!
DESCONGELADA	Hasta 2 horas		
RESTOS DE UNA TOMA DE BIBERÓN	Consumir la leche sobrante en el plazo de 1 hora y desecharla después		

Contenido: 25 Uds.

Advertencias de seguridad: No descongele la leche materna en el microondas ni en agua hirviendo. Para descongelar, colóquela durante la noche en el frigorífico, póngala en agua tibia o utilice un calientabiberones con función de descongelación.

Para calentar la leche, abra con cuidado el cierre de presión y viértala en un biberón. Coloque el biberón en un baño maría o en un calientabiberones.

¡Atención! No utilizar agua hirviendo, horno ni microondas. La leche materna nunca debe volver a congelarse. Deseche la leche no utilizada. Nunca mezcle leche recién extraída con leche ya congelada.

Comprueba siempre la temperatura de la leche antes de dar de comer a tu bebé. Si tu bebé ha bebido leche materna del biberón, debe consumirse en el plazo de una hora y tirar el resto.