

EXTRACTOR DE LECHE– SWING FLEX

INSTRUCCIONES DE USO

En estrecha colaboración con expertos en lactancia y los principales investigadores, Medela ha desarrollado extractores de leche que se adaptan de manera óptima a las necesidades de las mujeres lactantes. Para las madres que solo quieren lo mejor para ellas y su bebé. «Because you care.»

Símbolos

El símbolo de advertencia indica todas las instrucciones importantes para la seguridad. ¡El incumplimiento puede causar lesiones o daños al extractor de leche! En combinación con las siguientes palabras de señalización, el símbolo de advertencia significa:

-  **ADVERTENCIA**
Puede causar lesiones graves o la muerte.
-  **PRECAUCIÓN** - Puede causar lesiones leves.
-  **AVISO** – Puede causar daños materiales.
-  **INFORMACIÓN** - Información útil e importante que no es relevante para la seguridad.

Símbolos en el embalaje



Este símbolo indica que el material forma parte de un proceso de reciclaje.



Este símbolo indica un envase de cartón.



Este símbolo indica que el dispositivo debe protegerse de la luz solar.



Este símbolo indica que el producto frágil debe manejarse con cuidado.



Este símbolo indica la limitación de temperatura para operación, transporte y almacenamiento.



Este símbolo indica la limitación de humedad relativa para operación, transporte y almacenamiento.



Este símbolo indica la limitación de presión atmosférica para operación, transporte y almacenamiento.



Este símbolo indica que el producto debe almacenarse en seco.



Este símbolo indica que el embalaje contiene productos destinados a entrar en contacto con alimentos, según el Reglamento 1935/2004.



GTIN (Número Global de Artículo Comercial GSI), un número de identificación único a nivel mundial.



Este símbolo indica que se debe seguir el manual de instrucciones.

Símbolos en el dispositivo



Este símbolo indica que se debe seguir el manual de instrucciones.



0123 Este símbolo indica que el dispositivo cumple con la Directiva 93/42/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993 sobre productos sanitarios.



Este símbolo indica al fabricante.



Este símbolo indica que el dispositivo no debe desecharse como basura doméstica no separada (aplica solo en la UE).



Este símbolo indica que el dispositivo cumple con los requisitos de seguridad adicionales en Estados Unidos y Canadá para dispositivos eléctricos médicos.



Aplicación médica tipo BF (Body Floating).



Este símbolo hace referencia al número de serie del dispositivo.



Este símbolo indica la posición correcta de la batería.

IP22

Este símbolo indica la protección contra la penetración de cuerpos extraños y agua.



Este símbolo hace referencia a la fecha de fabricación (cuatro dígitos para el año y dos dígitos para el mes).

Símbolos en el adaptador de corriente



Este símbolo indica que el adaptador de corriente es un dispositivo de Clase II.



Este símbolo indica la certificación en China (China Compulsory Certification).



Este símbolo indica que el adaptador de corriente no debe utilizarse en exteriores.



Este símbolo indica que el dispositivo cumple con los requisitos de seguridad adicionales en Estados Unidos y Canadá para dispositivos eléctricos médicos.



Este símbolo indica que se cumplen los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).



Este símbolo hace referencia a la polaridad del conector de corriente continua.



La marca CE indica el cumplimiento de las directivas de baja tensión y compatibilidad electromagnética (EMC).



Este símbolo indica que el dispositivo no debe desecharse como basura doméstica no separada (aplica solo en la UE). La barra gruesa señala que el adaptador de corriente se comercializó después del 13 de agosto de 2005.



Este símbolo indica que se cumplen los requisitos de eficiencia energética.



Este símbolo significa corriente alterna.



Este símbolo hace referencia a corriente continua.



Este símbolo indica que se cumplen los requisitos de eficiencia energética.



Este símbolo significa que el adaptador de corriente ha sido sometido a pruebas de seguridad.



Este símbolo indica un transformador de seguridad a prueba de cortocircuitos.




Programa de registro para la protección del consumidor en Singapur.



Este símbolo indica que el dispositivo eléctrico utiliza transformadores y circuitos eléctricos para convertir la energía eléctrica en una o varias salidas de corriente.



Este símbolo indica que se cumplen las normativas en Australia y Nueva Zelanda (Regulatory Compliance Mark).

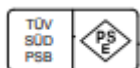

Este símbolo significa que se cumplen las normativas PSE (Japón, Ley de Seguridad de Productos y Materiales Eléctricos).



El símbolo KC indica que el producto cumple con los requisitos coreanos de compatibilidad electromagnética (EMC) y seguridad eléctrica.



Este símbolo indica la protección contra la penetración de cuerpos extraños y agua.



Indicaciones importantes de seguridad



El incumplimiento de estas instrucciones/indicaciones de seguridad puede ocasionar riesgos por el dispositivo. Se reservan cambios técnicos.

Aparato



¡Peligro de muerte por descarga eléctrica! ¡Mantenga el dispositivo seco!
¡Nunca lo sumerja en agua u otros líquidos!



No exponga la unidad del motor a la luz solar directa.



La vida útil del extractor de leche *Swing Flex* es de 275 horas de funcionamiento. La duración es de dos años.



La vida útil del extractor de leche *Swing Maxi Flex* es de 250 horas. La duración es de dos años.



El extractor de leche *Swing Flex*/*Swing Maxi Flex* no es resistente al calor: mantenga el dispositivo alejado de radiadores y fuego abierto.



Nunca utilice un dispositivo dañado. Las piezas dañadas o desgastadas deben ser reemplazadas.



Las reparaciones solo deben ser realizadas por un centro de servicio autorizado. ¡No realice reparaciones por su cuenta! No se permiten modificaciones en el dispositivo.

Uso eléctrico



La desconexión de la red eléctrica solo se garantiza al desconectar el adaptador de corriente de la toma de corriente.



Nunca toque un dispositivo eléctrico que haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente el enchufe de la toma de corriente.



Mantenga el adaptador de corriente alejado de superficies calientes.



Nunca deje el extractor de leche desatendido cuando esté conectado a una fuente de alimentación.

Uso



Utilice el extractor de leche Swing Flex/Swing Maxi Flex exclusivamente para el propósito descrito en este manual de instrucciones.



No utilice el extractor de leche Swing Flex/Swing Maxi Flex durante el baño o la ducha.



No conduzca durante la extracción de leche manos libres.



Al utilizar el extractor de leche Swing Flex/Swing Maxi Flex cerca de niños, se requiere la supervisión adecuada.



Por favor, consulte a su matrona o asesora de lactancia en caso de problemas o dolores.



Los dispositivos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia pueden afectar al extractor de leche Swing Flex/Swing Maxi Flex.



Nunca utilice un dispositivo eléctrico si el adaptador de corriente o el cable están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído, está dañado o ha caído al agua.

1. Indicaciones de seguridad importantes

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas.



ADVERTENCIA

Para evitar incendios, descargas eléctricas o quemaduras graves:

- Utilice únicamente el adaptador de corriente y el cable suministrados con el dispositivo. El uso de fuentes de alimentación o cables inadecuados puede provocar incendios, descargas eléctricas o un mal funcionamiento del aparato.
- No utilice nunca un aparato eléctrico si el adaptador o el cable están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído, dañado o ha estado en contacto con agua. En caso de daño, deje de usar el adaptador de inmediato y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Medela.
- No utilice ningún aparato eléctrico que haya estado en contacto con agua u otros líquidos. Además, tenga en cuenta lo siguiente:
 - No lo utilice durante el baño o la ducha.
 - No lo sumerja ni deje caer en agua u otros líquidos.
 - No permita que el agua corra sobre la unidad de la bomba.
 - Si un aparato eléctrico ha estado en contacto con agua u otros líquidos, no lo toque, desconéctelo de la toma de corriente, apáguelo y póngase en contacto con el fabricante.



ADVERTENCIA

Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones:

- No utilice el dispositivo mientras conduce un vehículo.
- La extracción de leche puede provocar contracciones. Extraiga leche solo después del parto. Si queda embarazada mientras está amamantando o extrayendo leche materna, consulte con un profesional sanitario cualificado antes de continuar.

- En caso de infección por hepatitis B, hepatitis C o virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna no reduce ni evita el riesgo de transmisión del virus al bebé a través de la leche materna.
- Lave todas las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche materna después de cada uso.
- Este dispositivo no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños menores de 14 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que sean supervisadas o instruidas en su uso por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños no deben jugar con el dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.



PRECAUCIÓN

Para evitar incendios o quemaduras:

- Asegúrese de que la tensión del adaptador de corriente sea compatible con la fuente de alimentación. Véanse los datos técnicos.
- Desconecte siempre los aparatos eléctricos de la fuente de alimentación inmediatamente después de su uso, excepto durante la carga.
- No guarde ni utilice el aparato en un lugar donde pueda caer o ser arrastrado hacia una bañera o un fregadero.
- El aparato y sus accesorios no son resistentes al calor. Manténgalos alejados de superficies calientes y del fuego abierto.
- No utilice el sacaleches cerca de materiales inflamables.



PRECAUCIÓN

Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones:

- Este producto está destinado al uso por una sola persona. Su uso por varias personas puede suponer un riesgo para la salud y anula la garantía.
- Este producto no puede ser reparado ni mantenido. No intente realizar reparaciones ni modificaciones usted mismo.
- No utilice nunca el aparato si está dañado. Sustituya las piezas defectuosas o desgastadas.
- Utilice el dispositivo únicamente para el propósito descrito en este manual de instrucciones.
- No use el aparato mientras duerme o si se encuentra excesivamente cansado.

- Si se desarrolla moho en el tubo, deje de usar el aparato y sustituya el tubo.
- No caliente la leche materna en el microondas ni la hierva. El calentamiento en microondas puede generar puntos calientes que causen graves quemaduras en la boca del bebé, además de alterar la composición de la leche materna.
- Antes del primer uso, limpie y desinfecte todas las piezas que entren en contacto con el pecho y la leche materna.
- Utilice únicamente las piezas recomendadas por Medela con este dispositivo.
- Si la extracción resulta incómoda o dolorosa, apague el aparato, libere el vacío entre el pecho y la copa con un dedo y retire la copa del pecho.
- Aunque durante los primeros usos del sacaleches pueda sentirse una ligera molestia, la extracción no debe causar dolor. Si no está segura del tamaño adecuado de la copa, visite www.medela.de o consulte con una matrona o asesora de lactancia que pueda ayudarle a elegir la medida correcta.



NOTA

Tenga en cuenta lo siguiente:

- Manipule con cuidado los biberones y las piezas: los biberones y otras partes de plástico pueden volverse frágiles al congelarse y romperse si se caen.
- El uso inadecuado (por ejemplo, caídas, roscado excesivo o golpes) puede dañar los biberones y las piezas.
- No alimente al bebé con leche materna utilizando biberones o accesorios que presenten signos de daño.


Descripción del producto Swing Flex

Swing Flex – extractor eléctrico de leche en 2 fases para extracción unilateral

1 × Unidad del motor:

Artículo 600.0975

Repuesto 099.0015

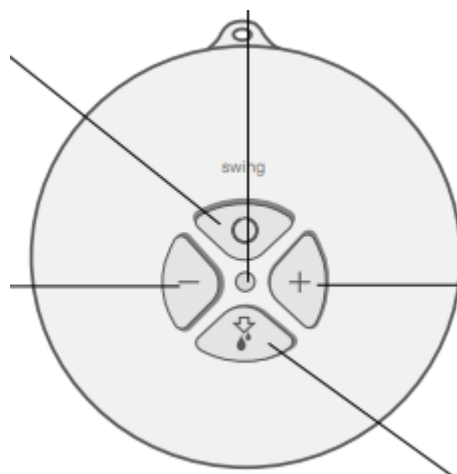

Botón de encendido/apagado



Reducir el vacío



Aumentar el vacío




Botón de expulsión (let-down)



LED



Entrada para tubo de PVC

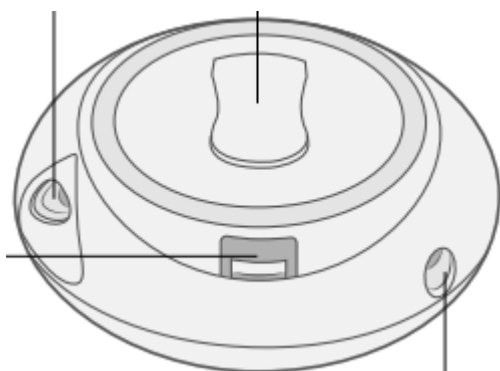

Entrada para cable del adaptador de corriente



Compartimento de baterías



Clip de sujeción

Copas de pecho:


1 × 21 mm (Artículo 101035239)

1 × 24 mm (Artículo 101035240)



1 × Tapa

Múltiple Artículo 200.2714

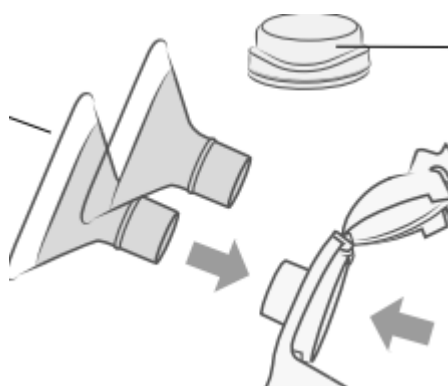

1 x Tapa



1 x Membrana



1 x Conector



Biberón para leche materna

Artículo 811.0021




Soporte para botella
Artículo 101033405



1 × Tubo Swing Flex Artículo 201.1079

Repuesto 101034002

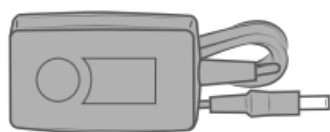

1 × Adaptador de corriente

Artículo

Repuesto

Euro	4.8V	201.1055	099.0016
UK	4.8V	201.1056	099.0017
AUS/NZ	4.8V	201.1057	099.0018
CN	4.8V	201.1058	099.0276
US/JP	4.8V	201.1059	101033542
KR 4.8V 101034044 101038305			

Limpieza antes del primer uso

Es importante realizar los siguientes pasos antes del primer uso del sacaleches:

1. Retire la tapa protectora y la copa para el pecho.
2. Desmonte y limpie todos los accesorios (excepto el tubo) siguiendo las instrucciones de limpieza.

Carga de la batería

Cargue la batería durante dos horas.

1. Utilice el cable USB para conectar la unidad de la bomba al adaptador de corriente.
2. Enchufe el adaptador a una toma de corriente.
 - Mientras se carga, el indicador luminoso parpadea en verde.
 - Cuando la carga se haya completado, el indicador permanecerá encendido en verde.



Información

Puede utilizar el sacaleches mientras la batería se está cargando. Sin embargo, la velocidad de carga será más lenta si el sacaleches está en funcionamiento al mismo tiempo.

Limpieza

Limpieza y desinfección del sacaleches

La limpieza y la desinfección son dos procesos diferentes. Deben realizarse por separado para su propia protección, la de su bebé y para mantener el rendimiento del dispositivo.

- **Limpieza:** eliminación de impurezas de la superficie de las piezas.
- **Desinfección:** reducción de microorganismos como hongos, bacterias o virus que puedan encontrarse en las superficies de las piezas.



PRECAUCIÓN

Así mantendrá el sacaleches limpio e higiénico:

- Desmonte y lave inmediatamente después de cada uso todas las piezas que hayan estado en contacto con la leche materna. Esto ayuda a eliminar los residuos de leche y evita el crecimiento de bacterias.
 - Lave las manos cuidadosamente con agua y jabón antes de manipular las piezas.
 - Para limpiar, utilice agua potable limpia y jabón líquido suave, o lave las piezas en agua corriente.
 - No lave las piezas del sacaleches en el lavavajillas, ya que podría dañarlas.
 - Utilice un detergente suave, adecuado para artículos de alimentación infantil.
 - No utilice estropajos o cepillos abrasivos.
 - No utilice productos desinfectantes para limpiar.
-



NOTA

Para evitar daños en el tubo:

- No limpie el tubo del sacaleches salvo cuando se indique expresamente:
-



NOTA

Tenga también en cuenta lo siguiente:

- Evite dañar las piezas del sacaleches durante la limpieza.
 - Guarde el sacaleches en un lugar limpio y seco dentro de una bolsa o recipiente protector.
 - Asegúrese de que las piezas estén completamente secas antes de guardarlas para evitar la formación de moho.
 - Si observa residuos en las piezas después del aclarado, puede deberse a la calidad del agua. Utilice agua potable o mineral de baja dureza.
 - Seque las piezas con un paño limpio o deje que se sequen al aire.
 - Para evitar que se acumulen residuos minerales que puedan afectar al rendimiento del sacaleches, limpie las piezas con regularidad.
-

Información

Las piezas pueden decolorarse si se lavan en el lavavajillas, pero esto no afecta a su funcionamiento.

Antes del primer uso:
Retire y deseche la tapa protectora y la copa para el pecho. Limpie y desinfecte el sacaleches y los biberones antes del primer uso siguiendo los pasos del 1 al 4. Limpie su sacaleches y sus biberones después de cada uso y desinfecte las piezas una vez al día después de limpiarlas.

1. Desmontaje

- Desmonte el sacaleches en sus piezas individuales (copa, conector y biberón).
 - Abra el conector presionando las pestañas laterales, retire la tapa y separe las membranas.
 - Separe los biberones, las tapas y los soportes.
-

2. Limpieza (antes del primer uso y después de cada uso)

Lavado a mano

- i. Enjuague todas las piezas desmontadas (excepto el tubo) con agua fría (aprox. 20 °C).
- ii. Lávelas con agua jabonosa caliente (aprox. 30 °C) utilizando un detergente suave apto para biberones.
- iii. Enjuáguelas durante 10 a 15 segundos con agua fría (aprox. 20 °C).

o

Lavavajillas

Coloque las piezas desmontadas (excepto el tubo) en la bandeja superior o en el cesto de cubiertos. Utilice un detergente común apto para lavavajillas.

3. Desinfección (antes del primer uso y una vez al día)

Hervido

Coloque las piezas desmontadas y limpias (excepto el tubo) en agua hirviendo y déjelas hervir durante **al menos 5 minutos**.

o

Desinfección en microondas

Coloque las piezas en una bolsa **Quick Clean®** y desinféctelas en el microondas según las instrucciones del fabricante.

Para obtener información sobre la disponibilidad en su país, consulte la página web o las tiendas locales de Medela.

4. Secado

Deje secar las piezas sobre un paño de cocina limpio y sin usar o sobre papel de cocina. Guarde las piezas secas en un lugar limpio y protegido del polvo. Guarde las piezas secas en un recipiente o bolsa limpia hasta su próximo uso. Es importante asegurarse de que no queden restos de humedad antes de guardarlas.

Limpieza de la unidad de bombeo



PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas o daños materiales:

- Desconecte el adaptador de corriente antes de limpiar la unidad de bombeo.
- No sumerja la unidad de bombeo en agua.
- No pulverice líquidos directamente sobre la unidad ni los vierta sobre ella.

Instrucciones:

1. Limpie la unidad de bombeo con un paño limpio humedecido con agua jabonosa suave.
2. Séquela con un paño limpio y seco.

Limpieza del tubo



PRECAUCIÓN

Si aparece moho en el tubo, deje de utilizar el aparato y sustituya el tubo.



NOTA

No utilice el dispositivo con el tubo mojado, ya que podría dañarse.

Enjuague:

Dado que el aire que circula por el tubo no entra en contacto con la leche, normalmente **no es necesario limpiarlo**.

Información

Si observa condensación dentro del tubo, lávelo y séquelo inmediatamente. Si el tubo ha estado en contacto con leche materna, debe limpiarse y desinfectarse. Póngase en contacto con el fabricante si es necesario sustituirlo.

Procedimiento:

1. Desconecte el tubo del dispositivo.

2. Enjuáguelo con agua fría y luego con agua caliente (aprox. 20 °C y 30 °C).
3. Agite suavemente para eliminar el exceso de agua.
4. Séquelo completamente al aire.
5. Asegúrese de que el tubo esté totalmente seco antes de volver a utilizarlo.

Montaje

Cómo encontrar el tamaño adecuado de la copa para el pecho
Véase la ilustración E 6 en las páginas de salida de aire.

1. Mida el diámetro de su pezón con la herramienta de medición correspondiente.
2. Elija la copa cuyo tamaño se ajuste mejor a su pecho.

Para más información sobre cómo determinar el tamaño correcto de la copa, visite www.medela.de.

Montaje del sacaleches



PRECAUCIÓN

Para evitar la contaminación de la leche materna:

- Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el sacaleches, las piezas o el pecho.
- Utilice siempre un paño limpio o toallitas desechables.
- No use el dispositivo si está dañado o no funciona correctamente.
- Inspeccione todas las piezas del sacaleches antes de cada uso y sustituya las que estén dañadas.
- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas antes de usarlas.
- Si las piezas están sucias, límpielas según el capítulo anterior.



NOTA

Para evitar daños en el sacaleches, todas las piezas deben estar completamente secas antes de su uso.


paso

- # Preparación para la extracción unilateral

- ### Imitación del ritmo de succión del bebé (Extracción en 2 fases)

Si no pulsa el botón “Let-down”, el sacaleches cambiará automáticamente a la fase de extracción después de un minuto.

Botones e indicadores luminosos

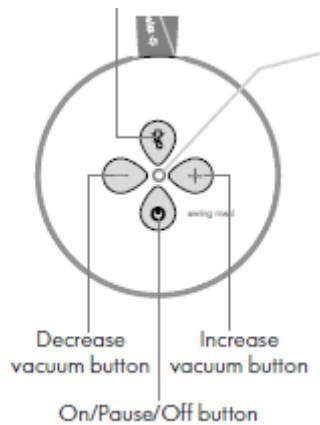

Funciones de los botones:

Botón “Let-down” → Cambia de la fase de estimulación a la fase de extracción.

Botón “Vacuum +” → Aumenta la intensidad de succión.

Botón “Vacuum –” → Disminuye la intensidad de succión.

Botón “Encendido/Pausa/Apagado” → Enciende, pausa o apaga la bomba.

Indicadores luminosos del estado

Luz indicadora	Modo de funcionamiento
Apagada	La bomba está apagada
Parpadea lentamente	La bomba está encendida, fase de estimulación
Encendida de forma fija	La bomba está encendida, fase de extracción
Parpadea rápidamente	La bomba está encendida, en pausa

Indicadores del nivel de batería

Color de la luz	Significado
Verde	Batería cargada completamente
Amarillo	Batería media, suficiente para una sesión de extracción
Rojo	Batería muy baja – cargue la bomba inmediatamente

(El esquema visual del panel de control muestra la disposición de los botones: en el centro el botón de encendido/pausa, arriba el botón “Let-down”, a la derecha “Vacuum +” y a la izquierda “Vacuum –”.)

Extracción de leche materna PRECAUCIÓN

- Si siente dolor o no se extrae suficiente leche:
 - No incline el sacaleches ni el biberón durante la extracción. Esto puede obstruir el flujo de leche y causar congestión mamaria.

- No intente extraer leche con un nivel de vacío incómodo o doloroso. Reduzca la intensidad hasta que resulte agradable.
- Si el dolor persiste, interrumpa la extracción y consulte a un profesional sanitario o asesora de lactancia.
- Si produce muy poca leche o la extracción resulta dolorosa, pida consejo médico.



NOTA

Asegúrese de que el tubo no esté doblado ni presionado durante la extracción.

1. Coloque la copa sobre el pecho de forma que el pezón quede centrado en el túnel.
2. Pulse el botón de encendido/pausa para iniciar la extracción.
→ Comienza la fase de estimulación y la luz indicadora parpadea.
3. Ajuste el nivel de vacío con los botones “Vacío +” y “Vacío –” hasta alcanzar un nivel cómodo.
4. Cuando la leche empiece a fluir, pulse el botón “Let-down”.
→ La luz deja de parpadear y la bomba entra en la fase de extracción.
→ Si no pulsa el botón “Let-down”, el cambio a la fase de extracción se realiza automáticamente después de un minuto.
5. Ajuste el vacío con los botones “Vacío +” y “Vacío –” hasta alcanzar su nivel de confort óptimo.



INFORMACIÓN

El “vacío de confort máximo” es el nivel más alto de succión que resulta cómodo para usted. Este nivel es diferente en cada mujer. La fase de estimulación sirve para alcanzar un nivel agradable de succión; no es necesario llegar al nivel máximo. El nivel de vacío puede variar en cada sesión de lactancia.

Para pausar la extracción y para apagar la bomba, consulte el apartado **Funciones de los botones:**

→ El sacaleches se apaga automáticamente después de 30 minutos si no se detecta ninguna interacción del usuario.

Pausa

Tanto en la fase de estimulación como en la de extracción, puede pausar el sacaleches. Así podrá cambiar de posición, ajustar el equipo o atender a su entorno.

1. Para pausar, pulse el botón de encendido/pausa mientras la bomba está en funcionamiento.
→ La bomba se detiene y la luz indicadora parpadea.
2. Para reanudar la extracción, pulse de nuevo el botón de encendido/pausa.



INFORMACIÓN

- Si la extracción no se reanuda en un plazo de dos minutos, la bomba se apaga automáticamente.
- Si realiza una pausa de más de dos minutos, se recomienda reiniciar en la fase de estimulación.

Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido/pausa durante unos segundos para apagar la bomba.

Después de la extracción

Prepare la leche para su almacenamiento de la siguiente manera:

1. Utilice el soporte para biberón para evitar que se vuelque.
2. Cierre el biberón con la tapa.

Manipulación de la leche materna

Directrices generales para su conservación

Recomendaciones para conservar leche materna recién extraída (para bebés sanos nacidos a término):

Temperatura ambiente (16–25 °C)	Refrigerador (4 °C o menos)	Congelador (–18 °C o menos)	Leche descongelada
Preferiblemente hasta 4 h*	Preferiblemente hasta 3 días*	Preferiblemente hasta 6 meses*	A temperatura ambiente: hasta 2 h

Hasta 8 h si la leche se extrajo en condiciones extremadamente higiénicas *Hasta 5 días si la leche se extrajo en condiciones* *Hasta 9 meses si la leche se extrajo en condiciones* En el refrigerador: hasta 24 h

Temperatura ambiente (16–25 °C)	Refrigerador (4 °C o menos)	Congelador (–18 °C o menos)	Leche descongelada
	<i>extremadamente higiénicas</i>	<i>extremadamente higiénicas</i>	No volver a congelar después de descongelar

Indicaciones:

- Lávese siempre las manos con agua y jabón antes de extraer leche.
 - Limpie todas las piezas del sacaleches y el entorno antes de usarlo.
 - Guarde la leche materna en el lugar más frío del refrigerador (no en la puerta).
 - Puede encontrar más información en su centro de lactancia o consultando a una asesora de lactancia.
-

Congelación



NOTA

- Congelar y descongelar repetidamente destruye la estructura de la leche. No vuelva a congelarla.
 - Congele la leche recién extraída en frascos o bolsas de plástico aptos para alimentos.
 - Llene los envases solo hasta tres cuartas partes para dejar espacio a la expansión.
 - Etiquete cada recipiente con la fecha y cantidad de leche.
 - Los envases y las piezas de plástico pueden agrietarse si se congelan y luego se caen.
 - No alimente al bebé con leche de recipientes o accesorios que presenten signos de daño.
-

Descongelación



PRECAUCIÓN

- No caliente ni descongele nunca la leche materna en el microondas ni en agua hirviendo. Esto puede provocar una pérdida de nutrientes y quemaduras.
- Para descongelar la leche, colóquela preferiblemente en el refrigerador durante la noche.
- También puede mantener el frasco o la bolsa bajo agua tibia (máx. 37 °C).



NOTA

Mueva suavemente el frasco o la bolsa para mezclar la grasa separada con la leche. No agite ni remueva la leche.

Solución de problemas

Si observa un funcionamiento inesperado del sacaleches, consulte la siguiente tabla y siga las indicaciones correspondientes.

Problema

Solución

El sacaleches no funciona después de pulsar el botón de encendido/pausa

Cargue la bomba durante 15 minutos y luego reiníciela. El proceso de carga se indica con una luz verde intermitente. Si la bomba sigue sin funcionar, contacte con el servicio técnico de Medela.

El sacaleches no genera vacío constante durante la succión

Contacte con el servicio técnico de Medela.

La luz indicadora parpadea rápidamente cuando intenta extraer leche o cargar la bomba

No es posible cargar o usar la bomba si la temperatura de la batería es demasiado alta. Deje que se enfríe antes de volver a usarla. Si la luz sigue parpadeando o el problema persiste, contacte con el servicio técnico de Medela.

La bomba tiene una succión débil o no succiona

Asegúrese de que todas las piezas estén correctamente montadas y ajustadas. Compruebe que la copa esté bien colocada sobre el pecho y que la membrana de silicona esté instalada correctamente. Si el tubo está doblado o bloqueado, enderézelo o cámbielo. Si el problema persiste, contacte con Medela.

Problema

Solución

El sacaleches no responde Mantenga pulsado el botón de encendido/pausa durante varios segundos para apagar la bomba. Si sigue sin funcionar, contacte con el servicio técnico de Medela.

La carcasa exterior de la bomba está húmeda Desconecte la bomba de la corriente y séquela con cuidado.

La bomba ha estado en contacto con agua Desconéctela de la corriente eléctrica y séquela completamente. Contacte con el servicio técnico de Medela antes de volver a usarla.

Si el problema no se resuelve o necesita más ayuda, visite www.medela.de y seleccione la sección “**Contacto**” para obtener la información de asistencia al cliente.

Accesorios

Los siguientes productos están disponibles por separado:

- Copas para el pecho PersonalFit Flex en los tamaños S (21 mm), M (24 mm), L (27 mm), XL (30 mm)
- Tubo Swing Maxi
- Conector PersonalFit Flex
- Biberón

Consulte la disponibilidad en su región a través del sitio web local o en tiendas autorizadas.

Garantía

Este aparato tiene una garantía de **3 años** desde la fecha de compra.

- Conserve el comprobante de compra.
- La garantía cubre defectos de material o de fabricación.
- Quedan excluidos los daños derivados de un uso indebido, falta de mantenimiento o desgaste normal.



Eliminación

del

dispositivo

Al finalizar la vida útil del sacaleches, desmonte las piezas y deséchelas siguiendo las instrucciones siguientes:

Copas para el pecho, conector, tubo y accesorios:
Están fabricados con plásticos no peligrosos y pueden desecharse con los residuos domésticos normales o reciclarse conforme a la normativa local.

Unidad de la bomba y adaptador de corriente:
No deben eliminarse con los residuos domésticos.
Entréguelos en un punto de recogida o contenedor específico para aparatos eléctricos y electrónicos.

En la Unión Europea, los distribuidores o fabricantes están obligados a aceptar los aparatos eléctricos usados para su correcta gestión y reciclaje.
Devuelva el dispositivo en un punto limpio o solicite información en su ayuntamiento o punto de venta.

El reciclaje adecuado contribuye a proteger los recursos naturales y evita posibles daños a la salud y al medioambiente.



PRECAUCIÓN

Las sustancias peligrosas contenidas en los equipos eléctricos y electrónicos pueden dañar la salud humana y el medioambiente si no se eliminan correctamente.

Normas internacionales

Compatibilidad electromagnética (CEM)

El sacaleches eléctrico Swing Maxi cumple todos los requisitos de las normas y directrices aplicables en materia de emisiones e interferencias electromagnéticas.



ADVERTENCIA

El sacaleches Swing Maxi no debe utilizarse directamente junto a otros dispositivos eléctricos ni apilarse con ellos. Si es necesario hacerlo, se debe comprobar previamente su correcto funcionamiento.
Dispositivos como routers, teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y transmisores de radio de corto alcance pueden afectar al funcionamiento del sacaleches si se encuentran a menos de 30 cm del aparato.

Artículos para alimentación infantil líquida

Las piezas destinadas a la alimentación de niños pequeños cumplen la norma europea EN 14350.

Datos técnicos

Adaptador de corriente
Modelos (según país de comercialización):

MS-V200U0050-01BDE / MS-V200U0050-01BGB / MS-V200U0050-01BUS / MS-V200U0050-01BCN / MS-H200U0050-01BAU

Entrada:	100–240	V~,	50/60	Hz,	0,5	A
Salida:	5	V	–	2	A	–
Eficiencia		media:		78,7		%

Consumo en vacío: 0,075 W

Materiales en contacto con la piel o la leche materna

- Copa: Polipropileno, elastómero termoplástico
- Conector: Polipropileno
- Membrana: Silicona
- Biberón: Polipropileno
- Tapa: Polipropileno

Todas las piezas que entran en contacto con la leche materna no contienen BPA (bisfenol A).

Fabricante:

Medela Medizintechnik GmbH & Co. Handels KG

Georg-Kollmannsberger-Str. 2

85386 Eching, Alemania

kundenservice@medela.de

Link:

<https://www.medela.com/de-de/stillen-und-abpumpen/produkte/milchpumpen/elektische-hands-free-milchpumpe/swing-flex-elektrische-2-phasen-milchpumpe?productId=1018>

Distribuido por: **Inversiones Müller S.L.** C.I.F.: B 07678170 vía Palma 3, local posterior C
07500 **Manacor** España Tel. +34 971 566002.